

Ultragarso sistemų ir keitiklių dezinfekavimo priemonės ir valymo tirpalai

PHILIPS

Tirpalas / sistema	Kilmės šalis arba regionas	Tinkamas naudojimas	Aktyvi sudedamoji dalis	Dezinfekanto tipas	Suderinamumo stulpeliai							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Valomosios šluostės „trophon Companion“	AU	Šluostyti	QUAT	LLD, ILD	T, C	T, C	T, C	T, C, H	T, C, H	T, C, H	T, C	T, C
„trophon EPR“	AU	Reprocesorius „trophon EPR“	Vandenilio peroksidas	HLD	T, C ⁸	T, C ⁸	N	N	N	N	T, C ⁸	N
„Vaposeptol“	FR	Purkšti / šluostyti	Alkoholis, biguanidas	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T, H	T	T
„Virox 5 RTU“	CA	Šluostyti	Vandenilio peroksidas	LLD, ILD	T, C	T, C	T, C	T, C, H	T, C, H	T, C, H	T, C	T, C
„Wavicide -01“	US	Mirkyti ¹	Glutaraldehidai	HLD, S	T, C ⁸	T, C ⁸	N	T	T	T	T, C ⁸	T
„Wip'Anios Excel“	FR	Šluostyti	QUAT, biguanidas, paviršinio aktyvumo medžiaga	CL, LLD, ILD	T, C	T, C	T, C	T, C, H	T, C, H	T, C, H	T, C	T, C
„Wip'Anios Premium“	FR	Šluostyti	QUAT, biguanidas, paviršinio aktyvumo medžiaga	CL, LLD, ILD	T, C	T, C	T, C	T, C, H	T, C, H	T, C, H	T, C	T, C

1. Niekada nepanardinkite ir neįmerkite jungties. Šiuos gaminius galima naudoti su automatiniais reprocursoriais (AR) laikantis procedūrų, aprašytų dokumente *Ultragarso sistemų ir keitiklių priežiūra ir valymas*.

2. „Antigermix S1“ ir „Hypernova Chronos“ nepatvirtinti naudoti su 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2, VL13-5 ir „VL13-5 Compact“.
3. „Oxygenon-I“ ir „Revital-Ox RESERT“ gali sukelti nedidelį keitiklių „S7-3t“ ir „S8-3t“ lanksčiosios ašies spalvos pakitimą. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos įrenginio saugumui arba efektyvumui.
4. Nestiprūs muilo tirpalai savo sudėtyje neturi aštrių ingredientų ir neerzina odos. Jų sudėtyje neturi būti kvepalų, aliejų arba alkoholio. Negalima naudoti rankų dezinfekavimo priemonių.
5. Naudojant „Antigermix E1“ gali pakisti transezofaginių keitiklių plastikinių dalių spalva.
6. Konkretūs tirpalai, naudojami su šiuo automatiniu reprocatoriumi, nurodyti skyriuje „Rekomendacijos dėl AR (automatinių reprocatorių)“ puslapyje 18.
7. Konkretūs tirpalai, naudojami su šiuo automatiniu reprocatoriumi, nurodyti skyriuje „Automatinių TEE keitiklių dezinfekavimo mašinų ir valymo bei dezinfekavimo mašinų rekomendacijos“ puslapyje 20.
8. Patvirtintas naudoti tik su kabeliais, bet ne su jungtimis.
9. Konkretūs tirpalai, naudojami su šiuo automatiniu reprocatoriumi (tik transvaginaliniams ir transrektaliniams keitikliams), nurodyti skyriuje „Rekomendacijos dėl AR (automatinių reprocatorių)“ puslapyje 18.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 2797



© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Visos teisės saugomos. Visišką ar dalinį atkūrimą ar perdavimą bet kokia forma ar bet kokiais būdais, elektroniniais, mechaniniais ar kitokiais, yra draudžiamas be išankstinio autoriaus teisių savininko rašytinio sutikimo.

Paskelbta JAV
4535 621 08911_B/795 * RGP 2021 - lt-LT