

Средства за дезинфекција и раствори за чистење на системи и сонди за ултразвук

PHILIPS

Раствор/ систем	Земја или регион на потекло	Квалификувана употреба	Активна состојка	Тип на средства за дезинфекци ја	Колони Компатибилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
STERRAD 100S	US	AR	Хидроген пероксид	S	N	N	N	N	N	T ⁶ ,C, H	N	N
Super Sani-Cloth	US	Пребришување	Алкохол, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
TD-5	US	TD-100 Reprocessor, TEEClean Reprocessor	Глутаралдехид	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-8	US	TD-100 Reprocessor, TEEClean Reprocessor	Орто- фталалдехид	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-12	US	TD-200 Reprocessor	Пероцетна киселина	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TEEZyme	US	TEEClean Reprocessor	Ензими, сурфактант	CL	N	N	N	T,C,H	T,C,H	N	N	N
TEEZyme сунѓер	US	Средство за претчистење	Ензими, сурфактант	CL	N	N	N	T,C,H	T,C,H	N	N	N
TEEZymeMC	US	Средство за претчистење	Ензими, сурфактант	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Tristel Duo	UK	Пена/бришење	Хлор диоксид	HLD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	T,C
Tristel Fuse за Stella	UK	Stella System	Хлор диоксид	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T

Раствор/ систем	Земја или регион на потекло	Квалификувана употреба	Активна состојка	Тип на средства за дезинфекци ја	Колони Компатибилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Tristel Multi-Shot	UK	Киснење ¹	Хлор диоксид	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Марамчиња Tristel Sporicidal	UK	Пребришување	Хлор диоксид	HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Tristel Trio Wipes / Tristel Trio Trace	UK	Пребришување за претчистење, спорицидно пребришување, пребришување за испирање	Ензими, сурфактант, хлор диоксид	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T
trophon2	AU	trophon2 Reprocessor	Хидроген пероксид	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	N	N	T,C ⁸	T,C
trophon придружни марамчиња за чистење	AU	Пребришување	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
trophon EPR	AU	trophon EPR Reprocessor	Хидроген пероксид	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	N	N	T,C ⁸	N
Vaposeptol	FR	Прскање/ Пребришување	Алкохол, бигванид	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Virox 5 RTU	CA	Пребришување	Хидроген пероксид	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wavicide -01	US	Киснење ¹	Глутаралдехид	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T

Раствор/ систем	Земја или регион на потекло	Квалификувана употреба	Активна состојка	Тип на средства за дезинфекци ја	Колони Компатибилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Wip'Anios Excel	FR	Пребришување	QUAT, бигуанид, сурфактант	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wip'Anios Premium	FR	Пребришување	QUAT, бигуанид, сурфактант	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

1. Никогаш немојте да потопувате и киснете приклучок. Овие производи може да се користат во автоматизирани репроцесори (AR) согласно постапките во документот *Грижа и чистење на системите за ултразвук и на сондите*.
2. Antigermix S1 и Hypernova Chronos не се одобрени за 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2, VL13-5 или VL13-5 Compact.
3. Охугенон-1 и Revital-Ox RESERT може да предизвикаат мала промена на бојата во флексибилниот отвор на сондите S7-3t и S8-3t. Оваа промена на бојата нема влијание на сигурноста или работата на уредот.
4. Благите раствори на сапун не содржат груби состојки и не ја иритираат кожата. Не треба да содржат парфем, масла или алкохоли. Не е одобрена употребата на средства за дезинфекција на дланки.
5. Antigermix E1 може да ги обезбоди пластичните делови од трансезофагијалните сонди.
6. За специфичните раствори употребени со овој автоматизиран репроцесор, погледнете „Принципи на AR (автоматизиран репроцесор)“ на страница 18.
7. За специфичните раствори употребени со овој автоматизиран репроцесор, погледнете „Упатства за автоматизирани дезинфектори и дезинфектори со чистачи на ТЕЕ-сонди“ на страница 21.
8. Одобрени само за кабли; не е одобрено за приклучоци.
9. За специфичните раствори употребени со овој автоматизиран репроцесор (трансвагинални и трансректални сонди само), погледнете „Принципи на AR (автоматизиран репроцесор)“ на страница 18.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 2797



© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Сите права се задржани. Репродукцијата или преносот во целост или делумно во кој и да е облик и со кои и да е средства, електронски, механички или други, е забрането без претходна писмена дозвола на сопственикот на авторското право.

Објавено во САД

4535 621 08931_V/795 * АВГ. 2021 год.. - mk-MK